



スムーズメーカー

DENNTAL IMPRESSION LUBRICANT

# Smooth Maker

スムーズメーカー  
歯科印象用滑沢剤

綺麗な模型は精度の良い補綴物への近道です。



スプレー  
タイプ

表面性状  
の向上


連合印象に  
対応

サンエス石膏株式会社  
SAN ESU GYPSUM CO.,LTD.

# 採得後の印象体に使用することで、石膏模型の表面性状を良好にします。

## 特長

- 1 採得後の印象体に使用することで、石膏模型の表面性状を滑沢にします。
- 2 連合印象にも適しています。
- 3 硬質石膏はもちろん、面荒れしやすい超硬質石膏にも効果を発揮し滑沢な印象面を再現します。

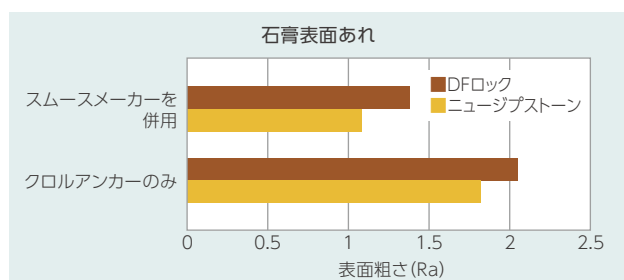

※当社製品及び当社測定データ・条件による

## 用途

採得後の印象体に噴霧する製剤です。

## 使用方法

※使用前にストッパーを外してください。

- 1 水洗した印象体に本剤を印象面全体に掛かるよう噴霧します。
- 2 10～30秒後に印象体を水洗します。  
※本剤が残ると石膏が変色する可能性があります。
- 3 印象体の余分な水分を除去して、石膏を注入してください。

## 包装

歯科印象用滑沢剤200gボトル1本  
スプレートリガー1個

## 使用上の注意事項

- 1 本剤は歯科医療従事者が使用してください。
- 2 本剤は飲み物ではありません。誤って飲み込んだ場合、水で口の中を洗浄し、コップ1～2杯の水又は牛乳を飲んでください。気分が悪い時は、医師の診断を受けてください。
- 3 本剤が皮膚に付着した場合は、大量の流水で洗ってください。目に入った場合には、大量の流水でよく洗い、眼科医の診断を受けてください。
- 4 他の製剤(酸・アルカリ・脱塩素剤・油脂類・他の塩素系薬剤等)と直接接触・混合しないでください。クロルアンカーの錠剤・溶液とは接触・混合しないようにしてください。
- 5 本剤は、説明書に記載の用途以外には使用しないでください。
- 6 歯科医療従事者以外が触れない場所に保管してください。

## 関連商品



クロルアンカー 歯科印象用除菌固定剤  
錠剤 12g×30包/箱

製造販売元:サンエス石膏株式会社

## サンエス石膏株式会社

大阪本社 | 〒564-0063 吹田市江坂町1-23-101 大同生命江坂ビル13F  
大阪営業所 | TEL(06)6339-0870(代) FAX(06)6339-0871

東京営業所 | 〒101-0047 東京都千代田区内神田1-14-6 福利久ビル5F  
TEL(03)5283-6201 FAX(03)5283-6205

中部営業所 | 〒489-0983 瀬戸市苗場町113  
TEL(0561)82-9185(代) FAX(0561)85-4179

福岡営業所 | 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-4-17 第6岡部ビル6F  
TEL(092)413-5220(代) FAX(092)413-5222

URL : <http://www.san-esugypsum.co.jp>  
E-mail : [headquarter@san-esugypsum.co.jp](mailto:headquarter@san-esugypsum.co.jp)

サンエス石膏

検索

お問い合わせ・商品のお求めは下記へ